

LUCIRA CHECK-IT

Test moléculaire rapide de dépistage de la COVID-19 à la maison

REMARQUE :


Il est important de suivre attentivement les instructions pour obtenir des résultats précis.

Votre trousse de test comprend :

1. Écouvillon nasal
2. Tube contenant une petite quantité de liquide mauve
3. Dispositif de test
4. Deux piles AA

Vous aurez besoin de :

- ✓ Surface propre et plane
**Le dispositif ne doit pas être déplacé pendant le test de 30 minutes.*
- ✓ Serviette de papier
- ✓ Désinfectant pour les mains

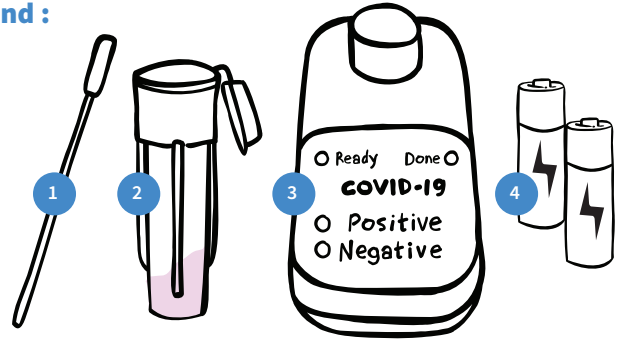

Adapté de la notice du produit Lucira CHECK-IT — Mis à jour le 19 janvier 2022

Ne pas manger ni boire pendant au moins 30 minutes avant de passer le test.

Avant de commencer :

- ✓ Nettoyez vos mains.
- ✓ Placez une serviette de papier sur une surface propre et plane.
- ✓ Ouvrez le contenu de votre trousse de test.
- ✓ Ouvrez le compartiment à piles et n'insérez les piles que lorsque vous êtes prêt à utiliser le test. **Assurez-vous que le voyant READY (prêt) est allumé.**
- ✓ Écrivez votre nom avec un marqueur ou un crayon sur le dispositif si vous testez plus d'une personne.


Scannez ce code QR pour obtenir une vidéo d'instructions : testtoprotect.ca/lucira



REMARQUE :

Pour que le test soit plus précis, nous vous recommandons d'effectuer un écouvillonnage de la gorge et des narines à l'aide du même écouvillon. Si vous choisissez de faire le prélèvement à un seul endroit, vous devez le faire dans les narines (à lui seul, le prélèvement dans la gorge ne donnera pas de résultats précis).

1

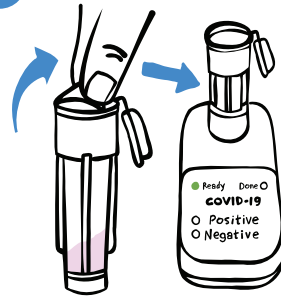


Retirez le sceau du tube d'échantillon, en faisant attention à ne pas renverser le liquide mauve, puis placez délicatement le tube dans le dispositif de test sans le pousser au fond.

Le voyant **READY** devrait être allumé.




2

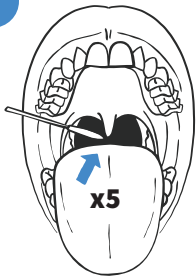

Penchez votre tête en arrière et ouvrez votre bouche.

Sans toucher les côtés de votre bouche ou votre langue, utilisez l'écouvillon pour frotter l'arrière de votre gorge (zone ombragée en noir sur l'illustration) **5 fois d'avant en arrière** (vous pourriez avoir la sensation d'être sur le point de vomir).


3

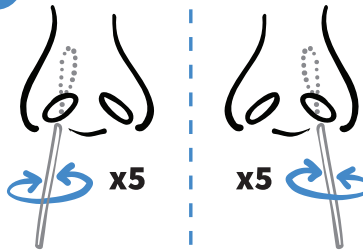

En utilisant le même écouvillon, insérez l'écouvillon dans la narine à environ 2 cm (0,5 p). Pour les enfants en bas âge, insérez simplement l'écouvillon dans la narine.

Frottez et faites tourner l'écouvillon vigoureusement 5 fois. Répétez l'opération pour l'autre narine (il est possible que vos yeux coulent).


4

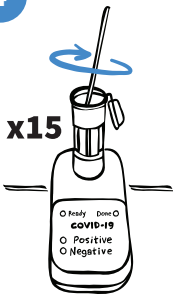

Tout en maintenant le dispositif de test stable sur une surface plane (pour éviter tout déversement), descendez doucement l'écouvillon dans le liquide mauve du tube d'échantillon jusqu'à ce qu'il touche le fond du tube.

Mélangez l'échantillon au liquide en le remuant **15 fois**. Jetez l'écouvillon.

5

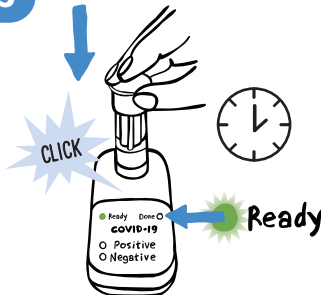

Fermez le bouchon du tube d'échantillon et enfoncez le tube dans le dispositif de test jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Le voyant **READY** se mettra à clignoter, signalant que le test est en cours.

Si le voyant **READY** ne se met pas à clignoter dans les 5 secondes, utilisez la paume de votre main pour pousser fermement le tube dans le dispositif de test.


6

Une fois le test terminé, mettez les fournitures de test à la poubelle, désinfectez-vous les mains et nettoyez l'espace de test.



Une fois le test terminé, les piles peuvent être retirées et réutilisées, ou éliminées comme il se doit.

RÉSULTATS (APRÈS 30 MINUTES) (OU PLUS RAPIDEMENT EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF)

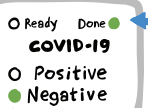

RÉSULTAT NÉGATIF

Les voyants **Done (terminé)** et **Negative (négatif)** sont tous les deux allumés.

Veillez noter :

- ✓ Un seul résultat négatif ne permet pas d'exclure la COVID-19 chez une personne présentant des symptômes.
- ✓ Restez à la maison si vous êtes malade et répétez le test dans les 48 heures.



RÉSULTAT POSITIF

Les voyants **Done (terminé)** et **Positive (positif)** sont tous les deux allumés.

Vous devez faire ce qui suit :

- ✓ Vous isoler immédiatement.
- ✓ Pour informer la Santé publique de votre résultat positif, veuillez remplir le questionnaire Dépistage de la COVID-19 - Déclaration et soutien à c19hc.nshealth.ca/self-report.
- ✓ Si vous obtenez un résultat positif au test de dépistage rapide, vous devez vous considérer comme ayant la COVID-19 et comme étant contagieux. Vous et les personnes de votre foyer devez alors vous isoler. Vous devez également informer les personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts étroits.
- ✓ Pour savoir ce qu'il faut faire, allez sur nshealth.ca/testedpositiveforcovid.

RÉSULTAT INVALIDE — Si les quatre voyants sont allumés, le résultat ne peut pas être utilisé. Le test doit être répété avec une nouvelle trousse.