

## QuickVue


Test rapide de dépistage de la COVID-19 à la maison

### REMARQUE :

Il est important de suivre attentivement les instructions pour obtenir des résultats précis.

### Votre trousse de test comprend :

1. Écouvillon nasal
2. Bandelette de test
3. Tube contenant une petite quantité de liquide
4. Porte-tube (Si votre test ne contient pas de porte-tube, veuillez trouver un récipient permettant d'éviter que le contenu du tube ne se renverse.)

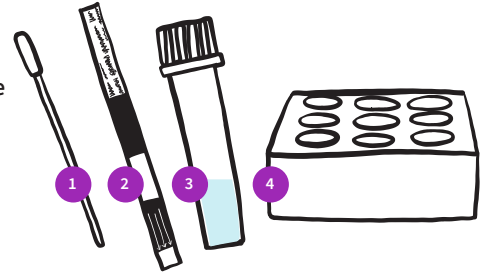

### Vous aurez besoin de :

- ✓ Désinfectant pour les mains
- ✓ Serviette de papier
- ✓ Minuteur ou horloge

Adapté de la notice du produit QuickVue — Mis à jour le 28 juin 2022

**Ne pas manger ni boire pendant au moins 30 minutes avant de passer le test.**



### Avant de commencer :


- ✓ Nettoyez vos mains.
- ✓ Ouvrez le contenu de votre trousse de test.
- ✓ Retirez le bouchon du tube prérempli et remettez le tube dans le porte-tube.
- ✓ Ouvrez l'emballage de l'écouvillon nasal. **Ne touchez pas la tête de l'écouvillon et ne retirez pas l'écouvillon nasal avant d'être prêt pour le prélèvement de l'échantillon.**

Scannez ce code QR pour obtenir une vidéo d'instructions : [testtoprotect.ca/quickvue](https://testtoprotect.ca/quickvue)

### REMARQUE :


Pour que le test soit plus précis, nous vous recommandons d'effectuer un écouvillonnage de la gorge et des narines à l'aide du même écouvillon. Si vous choisissez de faire le prélèvement à un seul endroit, vous devez le faire dans les narines (à lui seul, le prélèvement dans la gorge ne donnera pas de résultats précis).

1

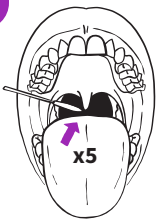

Penchez votre tête en arrière et ouvrez votre bouche. Sans toucher les côtés de votre bouche ou votre langue, utilisez l'écouvillon pour frotter l'arrière de votre gorge (zone ombragée en noir sur l'illustration) 5 fois d'avant en arrière (vous pourriez avoir la sensation d'être sur le point de vomir).

2

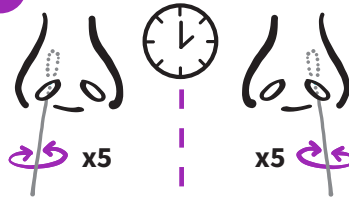

En utilisant le même écouvillon, insérez l'écouvillon dans la narine à environ 2 cm (0,5 p). (Pour les enfants en bas âge, insérez simplement l'écouvillon dans la narine).

Frottez et faites tourner l'écouvillon vigoureusement 5 fois, pendant au moins 15 secondes.

Répétez l'opération pour l'autre narine en utilisant le même écouvillon (il est possible que vos yeux coulent).

3



Placez immédiatement l'écouvillon dans le tube prérempli ouvert.

Veillez à ce que l'écouvillon touche le fond du tube.

Agitez l'écouvillon à 3 ou 4 reprises.

4




Après avoir agité l'écouvillon, laissez-le dans le tube pendant au moins 1 minute (utilisez un minuteur ou une montre).

### REMARQUE :

Cette étape est très importante, ne retirez pas l'écouvillon avant 1 minute.

5

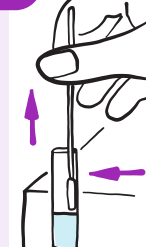

Après 1 minute, retirez délicatement l'écouvillon du tube. En retirant l'écouvillon, frottez sa tête contre la paroi du tube pour extraire autant de liquide que possible. **Ne touchez pas la tête de l'écouvillon.**

Jetez immédiatement l'écouvillon dans la poubelle.


6



Préparez la bandelette de test en ouvrant la pochette délicatement au niveau du **REPÈRE D'OUVERTURE**.

Sortez délicatement la bandelette de test en la tenant uniquement par sa partie supérieure.

7

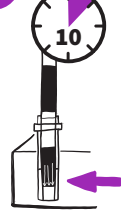

Placez la bandelette de test dans le tube prérempli, les flèches dirigées vers le bas. Laissez la bandelette de test dans le tube pendant 10 minutes.

**Ne manipulez ou ne retirez pas la bandelette avant la fin des 10 minutes.**

8



Après 10 minutes, retirez la bandelette de test du tube prérempli et placez-la sur une surface plane avec un bon éclairage. Examinez la bandelette afin d'obtenir les résultats du test.

La bandelette de test doit être lue dans les 5 minutes suivant son retrait du tube prérempli afin d'éviter des résultats inexacts.

9

Une fois le test terminé, mettez les fournitures de test à la poubelle, désinfectez vos mains et nettoyez l'espace utilisé pour le test.

**Des résultats faussement positifs, faussement négatifs ou invalides peuvent se produire si la bande est lue après la période de temps recommandée.**

## RÉSULTATS (APRÈS 10 MINUTES)




### NÉGATIF — UNE LIGNE

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle), pas de ligne à la ligne T (ligne de test)

Veillez noter :

- ✓ Si vous avez des symptômes, un seul résultat négatif ne peut pas être utilisé pour exclure la COVID-19. Refaites un test dans 48 heures (2 jours).
- ✓ Restez à la maison si vous vous sentez malade.

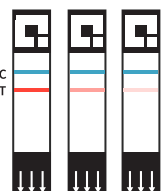

### POSITIF — DEUX LIGNES

Une ligne à la ligne C (ligne de contrôle), une ligne à la ligne T (ligne de test)

Si votre test est positif et que vous êtes une personne considérée comme présentant un risque élevé de maladie grave, vous avez la possibilité de confirmer votre résultat positif au test rapide au moyen d'un test PCR. Pour prendre rendez-vous, veuillez remplir l'évaluation en ligne à covid [covid-self-assessment.novascotia.ca/fr](https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr) ou appelez le 811.

Si vous obtenez un résultat positif au test rapide :

- ✓ Restez à la maison si vous vous sentez malade.
- ✓ Avisez Santé Nouvelle-Écosse de votre résultat positif au test rapide en remplissant e formulaire de dépistage – Déclaration et soutien à [c19hc.nshealth.ca/self-report](https://c19hc.nshealth.ca/self-report) (en anglais seulement) ou appelez au 1 833-797-7772 si vous n'avez pas accès à Internet ou si vous avez besoin d'aide pour le remplir. Ce formulaire permet d'identifier les personnes qui sont admissibles et qui pourraient bénéficier d'un accès rapide aux médicaments contre la COVID-19.
- ✓ Considérez-vous comme un cas contagieux de COVID-19 et visitez [nshealth.ca/testedpositiveforcovid](https://nshealth.ca/testedpositiveforcovid) (en anglais seulement) pour obtenir plus d'information sur ce que vous devez faire.

**RÉSULTAT INVALIDE** — Si votre test ne correspond pas aux exemples de résultats négatifs ou positifs, le test doit être répété avec une nouvelle trousse.

**Garder la trousse de test hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas boire le liquide du test.**